

The logo for Pleit, featuring the word "Pleit" in a white, cursive script font, underlined with a white horizontal line, set against a solid red square background.

Pleit

Gebrauchsanweisung und Anziehanleitung

Orthopädischer Maßschuh

Inhalt

1	Wichtige Hinweise	3
2	Allgemeine Informationen	4
3	Anziehenanleitung	5
4	Beschreibung der Einzelbestandteile	5
5	Medizinisch-therapeutische Aspekte	5
6	Körperpflege und Hygiene	5
7	Reinigung und Desinfektion / <i>Sterilisation</i>	5
8	Handhabung, Funktion und Risiken	5
9	Inspektion und Wartung	5
10	Entsorgung und Umweltschutz	6
11	Informationen für den Physiotherapeuten/Ergotherapeuten	6
12	Notizen	6

1 Wichtige Hinweise

- *Das Hilfsmittel ist eine Sonderanfertigung im Sinne der EU-Medizinprodukteverordnung 2017/745 MDR.*
- *Orthopädische Maßschuhe sollen helfen, Ihre Gesundheit zu erhalten und wiederherzustellen, Ihre Beschwerden zu beseitigen und Folgeschäden zu vermeiden.*

Tragen Sie bitte ausschließlich Ihre Maßschuhe, also auch im Haus und während der Freizeit. Hausschuhe, Badeschuhe und Sportschuhe nach Maß können ebenfalls bei Bedarf verordnet werden. 

Bei Volumenschwankungen der Füße kann es zu Passform- und infolgedessen auch zu Funktionsmängeln kommen. 

Untersuchen Sie Ihre orthopädischen Schuhe vor jedem Gebrauch auf Funktionstüchtigkeit, Verschleiß oder Beschädigung. 

Auch Maßschuhe müssen eingelaufen werden! Bitte tragen Sie Ihre neuen Maßschuhe am Anfang nur stundenweise und kontrollieren Sie regelmäßig Ihre Füße nach eventuellen Druckstellen. 

Durch zu straffes Zuziehen der Verschlüsse sind Stauungen in der Hand, übermäßiger Druck bzw. Druckstellen möglich. 

Die Verwendung falscher Reinigungsmittel kann zu Funktionsverlust durch Beschädigung von Materialien führen. 

▲ Hinweise

- Besprechen Sie alle Maßnahmen zur Funktionserhaltung und -verbesserung, sowie Pflege und Hygiene des betroffenen Körperteils mit Ihrem Arzt.
- Bei allergischen Reaktionen suchen Sie bitte Ihren Arzt auf, um eine Klärung zu erreichen.

▲ Warnungen

- Der direkte Kontakt von Ledermaterialien mit verletzter Haut ist unbedingt zu vermeiden

2 Allgemeine Informationen



Sonderanfertigung

Patient / Anwender

Hilfsmittel / Verordnungstext

Verordner

Erklärung

Die Pleil GmbH erklärt hiermit alleinverantwortlich, dass die oben genannte Sonderanfertigung für den oben genannten Patienten individuell hergestellt wurde und den grundlegenden Anforderungen der EU-Verordnung 2017/745 entspricht. Sollten bestimmte grundlegende Forderungen nicht eingehalten worden sein, so wurden sie aufgeführt. Die entsprechende Produktdokumentation wird aufbewahrt. Diese Konformitätserklärung bezieht sich nur auf die im Rahmen der Sonderanfertigung für den oben genannten Patienten individuell angefertigten Komponenten. Für etwaige konfektionierte Hilfsmittel sind die jeweiligen Hersteller verantwortlich.

Datum, Mitarbeiter,
Unterschrift

Sehr geehrte Patientin, sehr geehrter Patient,

Sie haben von unserem orthopädiestechnischen Fachbetrieb ein speziell verordnetes und individuell für Sie hergestelltes Hilfsmittel als Sonderanfertigung erhalten. Bitte lesen Sie die vorliegende Gebrauchsanweisung aufmerksam durch, sie enthält viele wichtige Informationen und Sicherheitshinweise. Das Hilfsmittel ist nicht für die Anwendung durch andere Personen vorgesehen, da es speziell auf Ihre Bedürfnisse und Maße abgestimmt wurde.

Die Tragedauer Ihrer orthopädischen Maßschuhe beträgt 2 Jahre, bei Hausschuhen 4 Jahre.

Ihre orthopädischen Maßschuhe sollen zu jeder Zeit beschwerdefrei sitzen. **Übermäßiger Druck oder Scheuerstellen können zu Komplikationen führen. Sollten Probleme auftreten, so bitten wir Sie, sich umgehend an uns oder Ihren behandelnden Arzt zu wenden.**

Um die Funktion und Sicherheit Ihrer orthopädischen Maßschuhe zu erhalten, ist diese sorgfältig zu behandeln! **Jede Art von Überbelastung oder unsachgemäßer Handhabung kann zu Funktionseinschränkungen bis hin zu Materialbrüchen führen.** Haben Sie weitere Fragen im Umgang mit Ihren orthopädischen Maßschuhen, wenden Sie sich bitte an den Hersteller.

3 Anziehanleitung

Stellen Sie Ihre Füße vor dem Zuschnüren der Schuhe auf die Hacke, um sicherzustellen, dass Sie nicht nach vorne in den Schuh rutschen. Schließen Sie die Schuhe gleichmäßig, ohne übermäßigen Druck.



4 Beschreibung der Einzelbestandteile

Die Beschreibung der Einzelbestandteile können Sie beim Hersteller einsehen.

5 Medizinisch-therapeutische Aspekte

s. auch Klinische Bewertungen

6 Körperpflege und Hygiene

Über das Maß der allgemeinen Körperpflege hinaus besteht die Notwendigkeit die Haut besonders im Bereich der Füße gut zu beobachten.

7 Reinigung

Damit Ihre Schuhe lange ihren Dienst tun, Pflegen Sie diese bitte regelmäßig. Wir beraten Sie gerne über spezielle Pflege und Reinigungsmittel.

8 Handhabung, Funktion und Risiken

Sitz, Form und Funktion Ihrer orthopädischen Maßschuhe wurden durch Ihren Orthopädie- Schuhtechniker kontrolliert. Der alltägliche Umgang muss allerdings insbesondere bei Erstversorgungen zunächst erlernt werden. Das An- und Ablegen sowie die allgemeine Handhabung bedarf eines gewissen Trainings. Ihr Orthopädie- Schuhtechniker hat mit Ihnen die geeignete Technik des An- und Ablegens geübt. Achten Sie stets darauf, dass Ihre orthopädischen Maßschuhe beschwerdefrei sitzen!

Übermäßiger Druck bzw. Druckstellen, Reizungen, Wundreibungen der Haut oder gar Ödeme führen zu Komplikationen und sind nicht zu akzeptieren! Bei starker Schweißbildung können in seltenen Fällen allergische Reaktionen auf der Haut auftreten

- *einen Hinweis an den Anwender und/oder den Patienten, dass alle im Zusammenhang mit dem Produkt aufgetretenen schwerwiegenden Vorfälle dem Hersteller und der zuständigen Behörde des Mitgliedstaats, in dem der Anwender und/oder der Patient niedergelassen ist, zu melden sind;*

9 Inspektion und Wartung

Einen Kontrolltermin vereinbaren Sie bitte 4 Wochen nach Auslieferung. Bei Schmerzen oder Veränderungen aufgrund der Schuhe, nehmen Sie bitte sofort Kontakt mit uns auf (Bringen Sie bitte ein Wechselpaar mit).

Bei Diabetikern können die Kontrolltermine abweichen.

10 Entsorgung und Umweltschutz

- *Warnungen oder Vorsichtshinweise, die im Hinblick auf eine **sichere Entsorgung** des Produkts, seines Zubehörs und der gegebenenfalls verwendeten Verbrauchsmaterialien zu berücksichtigen sind. Diese Informationen decken gegebenenfalls folgende Bereiche ab:*
 - *Infektionen oder mikrobiologische Gefahren wie z. B. Nadeln oder chirurgische Geräte, die mit potenziell infektiösen Stoffen menschlichen Ursprungs kontaminiert wurden, und*
 - *physikalische Gefahren wie z. B. durch scharfe Kanten;*

Im Sinne unserer Aktivitäten für den Umweltschutz bitten wir Sie, Ihre orthopädischen Maßschuhe ordnungsgemäß im Restmüll zu entsorgen

11 Informationen für den Physiotherapeuten/Ergotherapeuten

Der Patient / die Patientin wurde in unserem Hause umfassend orthopädietechnisch versorgt. Um die optimale Versorgungsstrategie umzusetzen, ist eine enge interdisziplinäre Zusammenarbeit erforderlich. Bei eventuell auftretenden Fragen stehen Ihnen unsere Spezialisten jederzeit telefonisch (siehe Rückseite) oder auch per E-Mail zur Verfügung.

12 Notizen

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....